


Passaggio 6: Etichettare il campione

Etichettare il campione con i dati elencati di seguito. Scrivere con una penna a sfera su una superficie liscia e rigida.

ESEMPIO

MARIO
Nome
ROSSI
Cognome
16/05/58
Data di nascita (gg/mm/aa)
16/03/13
Data di raccolta (gg/mm/aa)
08:15
Ora di raccolta (00:00 - 23:59)

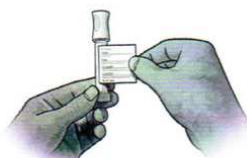

- a. Compilare entrambe le etichette. **Scrivere in stampatello** i dati come mostrato nell'esempio.

Nome	Nome
Cognome	Cognome
Data di nascita (gg/mm/aa)	Data di nascita (gg/mm/aa)
Data di raccolta (gg/mm/aa)	Data di raccolta (gg/mm/aa)
Ora di raccolta (00:00 - 23:59)	Ora di raccolta (00:00 - 23:59)

- b. Staccare l'etichetta adesiva dal foglio.

- c. Avvolgere un'etichetta sulla provetta, come illustrato in figura.

- d. Applicare un'etichetta sul coperchio del contenitore di raccolta del campione, come illustrato in figura.

EC REP

Exact Sciences Europe Ltd.
Burns House, Harlands Road
Haywards Heath
West Sussex
RH16 1PG, UK
Email: areurope@exactsciences.com
+44 1444 414278

LBL-0321rev1